

## Návod na použitie

### Dôležité bezpečnostné upozornenia

#### Pred použitím si prečítajte všetky pokyny

Pred prvým použitím dezinfikujte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s materským mliekom podľa pokynov z obrázkov strany „QUICK START GUIDE“ v anglickom návode. Pred každým použitím vizuálne skontrolujte jednotlivé komponenty, či nie sú prasknuté, odštiepené, natrhnuté, nie sú zafarbené alebo poškodené. Ak zistíte poškodenie zariadenia alebo komponentov, prestaňte ho používať, kým nebudú diely vymenené. Môžete tiež potrebovať väčší alebo menší nadstavec/košík na prsia. Ak si chcete objednať náhradné diely alebo nadstavce na prsia rôznych veľkostí, navštívte náš eshop [www.lansinoh.sk](http://www.lansinoh.sk). Neodsávajte počas tehotenstva. Odsávanie počas tehotenstva môže vyvolať pôrod.

**Upozornenie:** Lansinoh® nabíjateľná dvojitá elektrická odsávačka mlieka je predmetom osobnej starostlivosti. Aby sa predišlo krížovej kontaminácii/infekcii, hadičky a odsávačka materského mlieka by sa medzi matkami nikdy nemali deliť ani ich opätovne predávať druhej matke. Každý používateľ by mal používať svoju vlastnú odsávačku. Ak ste matka infikovaná: hepatitídou B, hepatitídou C alebo vírusom HIV, odsávanie materského mlieka pomocou nabíjateľnej dvojitaj elektrickej odsávačky Lansinoh® neznižuje ani neodstráni riziko prenosu vírusu na vaše dieťa cez materské mlieko.

Pri používaní elektrických výrobkov, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

#### Aby ste znížili riziko popálenín, požiaru, zranenia osôb alebo zasiahnutia elektrickým prúdom :

- Tento výrobok by nikdy nemal zostať bez dozoru, keď je zapojený.
- V prípade použitia výrobku v blízkosti dieťa, zabezpečte potrebný prísny dohľad.
- Tento produkt používajte iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
- Opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis. Nesmiete ho sami opravovať. Na zariadení nie je povolené vykonávať žiadne úpravy, stratiť tým platnosť záruky.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol, poškodil sa alebo spadol do vody.
- Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov.
- Nikdy nepoužívajte počas spánku alebo ospalosti.
- Nikdy nehadzajte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru alebo hadičiek.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak je poškodený alebo ak chýbajú niektoré časti.
- Nedovoľte malým deťom alebo domácim zvieratám, aby sa hrali s hlavnou jednotkou, s komponentami, nabíjateľnou batériou alebo sieťovými adaptérom.
- Nepoužívajte produkt vonku s AC adaptérom, v blízkosti použitia produktov s aerosólými sprejmi, alebo kde sa podáva kyslík.
- Ak sa puzdro napájacieho adaptéra alebo káble uvoľní, oddelia alebo rozstrapatia, okamžite prestaňte napájací adaptér používať.

#### Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom:

- Výrobok odpojte ihneď po použití.
- Nepoužívajte pri kúpaní.
- Neumiestňujte ani neskladujte výrobok tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
- Odsávačku alebo napájací adaptér nevkladajte ani nepúšťajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nesiahajte po elektrickom výrobku, ktorý spadol do vody. Ihneď ho odpojte.

**Upozornenie:** Ak počas odsávania pociťte nepohodlie v prsníku alebo na bradavke, vložte prst medzi nadstavce a prsník, aby ste okamžite prerušili sanie. Ak dôjde k podráždeniu alebo neprijemným pocitom, prestaňte používať a navštívte lekára.

#### OBSAH

- Príprava na prvé odsávanie
- Zostavenie odsávačky na odsávanie materského mlieka pre dvojité alebo single odsávanie.
- Základné ovládacie prvky, displej a funkcie
- Pokyny na uchovávanie materského mlieka
- Čistenie odsávačky na odsávanie materského mlieka
- Výmena nabíjateľnej batérie
- Riešenie problémov
- Technické údaje
- Záruka

## 1. Príprava na prvé odsávanie

### Čistenie odsávačky materského mlieka pred prvým použitím

- Pred manipuláciou s odsávačkou materského mlieka si vždy dôkladne umyte a osušte ruky mydlom a vodou.
- Odsávačku materského mlieka rozložte a diely vložte do veľkého hrnca.
- Zalejte komponenty vodou a uistite sa, že je v hrnci priestor na ich voľné plávanie.
- Privedte vodu do varu a nechajte komponenty variť 5 minút.
- Po uvarení vyberte diely z hrnca pomocou klieští a položte na čistú utierku, aby ste ich vysušili, pričom diely prikryte druhou utierkou.
- Pred montážou a použitím nechajte diely úplne vyschnúť. Čiastočne vysušené časti môžu ovplyvniť činnosť odsávačky.
- Akonáhle sú diely suché, môžu byť uložené v čistej plastovej nádobe s vekom alebo v čistom plastovom vrecku na zips.

### Nabíjanie batérie pre odsávanie bez použitia kábla

Nabíjateľná batéria Lansinoh® sa dodáva nainštalovaná priamo v základni odsávačky. Ak si prajete odsávať bez použitia kábla, pred prvým odsávaním je potrebné batériu nabiť.

- Zasuňte AC adaptér do odsávačky a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
  - Na LCD obrazovke sa zobrazí ikona napájacieho adaptéra a ikona blíkajúcej batérie indikujúca prebiehajúce nabíjanie.
  - Nechajte odsávačku nabíjať minimálne 3 hodiny pred použitím pre odsávanie bez kábla.
- Keď je odsávačka zapnutá a plne nabitá, ikona batérie na obrazovke zobrazí 4 čiariky.

### Pokyny na správnu manipuláciu a bezpečné skladovanie nabíjateľnej batérie

- Batériu neponárajte do vody a nedovoľte, aby navlhla.
- Batériu nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako je oheň alebo ohrievač.
- Nepoužívajte iné nabíjačky ako AC adaptér dodaný s odsávačkou.
- Nepripájajte batériu priamo do nástenných zásuviek alebo zásuviek zapalovača cigariet.
- Neprepichujte kryt batérie klincom alebo iným ostrým predmetom, nerozbiť ju kladivom ani naň nestúpajte.
- Batériu neudierajte, nehádzajte ani ju nevystavujte fyzickým nárazom, vrátane pádu batérie na tvrdú podlahu.
- Nepokúšajte sa batériu akýmkoľvek spôsobom rozoberať alebo upravovať.
- Batériu nevkladajte do mikrovlnnej rúry alebo tlakovej nádoby.
- Batériu nepoužívajte v kombinácii s primárnymi batériami (ako napr. batérie so suchými článkami) alebo batériami rôznej kapacity, typu alebo značky.
- Batériu nepoužívajte, ak zapáchá, vytvára teplo, zmení farbu alebo sa zdeformuje, alebo ak sa akýmkoľvek spôsobom javí abnormálne. Ak sa takáto batéria používa alebo sa nabíja, vyberte ju z odsávačky a prestaňte používať.


Batéria by sa nemala vyberať, ak je odsávačka zapojená, zapnutá alebo odsáva mlieko.

#### UPOZORNENIE!

Nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde je vystavená extrémnemu teplu, napríklad v aute na priamom slnku počas horúceho dňa. Batéria môže byť prehriata. To môže tiež znížiť výkon batérie a/alebo skrátiť jej životnosť.

- Ak batéria vytečie a elektrolyt sa vám dostane do očí, netrite ich. Namiesto toho si vypláchnite oči čistou tečúcou vodou a ihneď vyhľadajte lekárska pomoc - elektrolyt môže spôsobiť poranenie očí.
- Batériu používajte iba za podmienok prostredia pre prevádzku uvedených v tabuľke. Ak tak neurobité, môže dôjsť k zníženiu výkonu alebo skráteniu životnosti. Nabíjanie batérie mimo týchto teplôt môže spôsobiť prehriatie, výbuch alebo požiar.

## 2. Zostavenie odsávačky na odsávanie materského mlieka pre dvojité alebo single odsávanie.

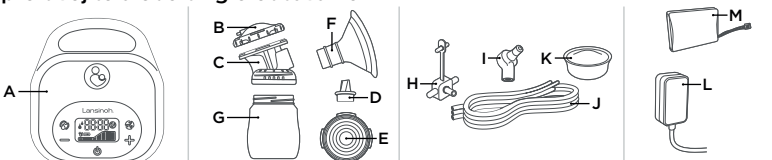


NÁZOV	Č. PRODUKTU	
A	Základňa odsávačky	53362
B	Kryt na membránu (2x)	53410
C	Zhľadivo (2x)	53454
D	Biely ventil (2x)	53401
E	Silikonová membrána (2x)	53402
F	ComfortFit® prsný nadstavec 25mm (2x)	53408
G	Fľaša na skladovanie mlieka (2x)	53562
H	Y konektor na hadičky (1x)	53405
I	Konektor odsávačky (1x)	53433
J	Silikonové hadičky (2x 300mm, 1x 600mm)	53403
K	Viečko na fľašu (2x)	53564
L	9V AC Adaptér	53674
M	Nabíjateľná lítium-iónová batéria (1x)	53352

## Zostavovanie odsávačky v jednotlivých krokoch

Pre lepšie pochopenie zostavovania odsávačky, odporúčame otvoriť si anglický návod na str. 2-4 a sledovať postup zároveň s grafickou predlohou.

- Umiestnite fialovú silikonovú membránu výbežkami nadol na hornú časť zhlaviva. Uistite sa, že výbežky membrány bezpečne zapadnú medzi výrezmi zhlaviva (pozri obrázok 1).
- Umiestnite priehľadný kryt membrány na zhlavie a otočte, aby ste ho zaistili tak, že výčnelok, kde sa zapája hadička smeruje k zadnej časti odsávačky (pozri obrázok 2).
- Pevne nasuňte biely ventil do spodnej časti zhlaviva (pozri obrázok 3 na strane 3).
- Jemne nasuňte biely ventil do otvoru zhlaviva (pozri obrázok 4 na strane 3).
- Naskrutkujte fľašu ku zhlaviu (pozri obrázok 5).
- Pripojte koniec 300 mm hadičky k zadnej časti krytu na membránu. Uistite sa, že hadička je zatlačená úplne k pripojovacieho portu a úplne ho zakrýva (pozri obrázok 6).
- Pripojte druhý koniec 300 mm hadičky k Y konektoru (pozri obrázok 7).
- Pre nastavenie odsávačky na single odsávanie: uzavrite druhú časť Y konektora zakrytím pomocou výčnelku. Pre nastavenie dvojitého odsávania: opakujte kroky 1-7. (Pozri obrázok 8).
- Pripevnite jeden koniec 600 mm hadičky ku Y konektoru. Druhý koniec 600 mm hadičky pevne pripievntie ku konektoru odsávačky (pozri obrázok 9).
- Vložte konektor odsávačky do otvoru na ľavej strane základne odsávačky (pozri obrázok 10).
- Nastavenie pre single a dvojitú odsávanie (pozri obrázok 11 na strane 4).

## 3. Základné ovládacie prvky, displej a funkcie

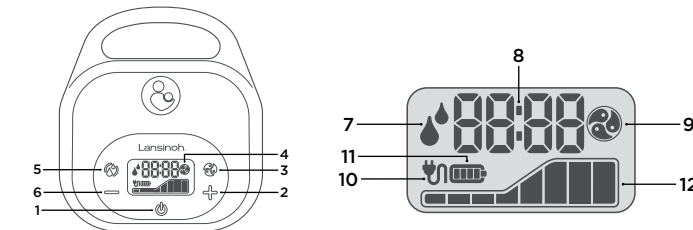

- Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
- Tlačidlo na ovládanie zvýšenia úrovne sania
- Tlačidlo prepínania štýlu odsávania
- LCD Displej
- Tlačidlo prepínania fáz stimulácie/odsávania
- Tlačidlo na ovládanie zníženia úrovne sania
- Indikátor fázy (stimulácie alebo odsávania)
- Zobrazenie času
- Ukazovateľ štýlu odsávania
- Ukazovateľ napájania prúdom
- Indikátor stavu batérie
- Indikátor úrovne odsávania

### Používanie fázy stimulácie a fázy odsávania

- Stlačením a podržaním tlačidla zapnutie/vypnutie odsávačku zapnete. Odsávačka sa spustí vždy do fázy stimulácie. Pri úplne prvom použití sa odsávačka spustí vo fáze stimulácie, úroveň satia 5.
- Po dvoch minútach sa fáza stimulácie automaticky zmení na fázu odsávania. Pri úplne prvom použití sa odsávačka spustí v štýle odsávania 2, s úrovňou satia 3.
- Ak uprednostňujete obidve prednastavené dvojitomú fázu stimulácie alebo ak vaše mlieko začne vytekať skôr ako po dvoch minútach, stlačte tlačidlo prepínania fáz stimulácie/odsávania, čím sa presuniete do fázy odsávania.
- Funkcia automatickej pamäte uloží posledný štýl odsávania a úroveň satia pre každú fázu. Úroveň odsávania sa však postupne zvýši na posledné použité nastavenie pre pohodlnejšie odsávanie. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ režimu štýlu, čo znamená, že ste vo fáze odsávania.

### Odsávačka disponuje tromi štýlmi odsávania, ktoré si môžete zvoliť pri odsávaní. Odsávací štýl 1, odsávací štýl 2, odsávací štýl 3.



- V momente, keď je odsávačka vo fáze odsávania, viete si vybrať požadovaný štýl odsávania, ktorý je pre Vás najvhodnejší a najefektívnejší. Zvoľte ho stlačením tlačidla prepínania štýlu odsávania.
- Opätovným stlačením tlačidla zvolíte ďalší štýl odsávania.

**Poznámka:** Tlačidlo prepínania štýlu odsávania funguje len vtedy, keď je odsávačka vo fáze odsávania.

- Zvolená fáza sa zobrazí na LCD displeji pomocou indikátora fázy odsávania (7).

### Na výber je tiež osem úrovní sania:

1. Pre silnejšie sanie, stlačte tlačidlo ovládania zvýšenia úrovne sania. Vždy, keď sa odsávačka prepne na vyššiu úroveň sania, cieľová úroveň bude blikať. Odsávačka pomaly prejde na vyššiu úroveň sania. Po dosiahnutí cieľovej úrovne blikanie prestane.

- Nastavte nižšie sanie stlačením tlačidla na ovládanie zníženia úrovne sania.

- Aktuálna úroveň sania bude indikovaná počtom tmavých pruhov na indikátore úrovne nasávania.



**Poznámka:** Ak sa kedykoľvek počas odsávania stane odsávanie prsníka neprijemným, znížte úroveň odsávania stlačením tlačidla na ovládanie zníženia úrovne sania (-) na ľavej strane obrazovky LCD alebo odpojte hadičky z elektrickej základne.

**Poznámka:** Osvetlenie LCD displeja sa automaticky vypne, ak sa ovládacie tlačidlá nepoužívajú dlhšie ako 20 sekúnd, aby sa šetrila energia. Ak je odsávačka ponechaná zapnutá a bez dozoru dlhšie ako 60 minút, odsávačka sa automaticky vypne. Ak je odsávačka pozastavená počas odsávania a ponechaná bez dozoru dlhšie ako 20 min, automaticky sa vypne. Ak chcete odsávačku znova zapnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia niekoľko sekúnd.

### Ukončenie odsávania

- Po dokončení odsávania vypnite odsávačku pomocou tlačidla Zap./vypnúť.
- Po vypnutí odsávačky zostane displej niekoľko sekúnd zapnutý.
- Pred odstránením prsných nadstavcov z prsníka sa uistite, že na bradavkách už nie je žiadne sanie. V prípade potreby prerušte odsávanie vložením prsta medzi prsník a nadstavec. Po prerušení sania je možné prsný nadstavec bezpečne odstrániť.

## 4. Pokyny ku skladovaniu materského mlieka

Konkrétne pokyny na uchovávanie si overte u svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo u certifikovanej laktáčnej konzultantky. Pri mrazení skladujte v zadnej časti mrazničky a neskladujte mlieko vo dvierkach, pretože teplota môže pri otvorení a zatvorení dvierok kolísat. Označte všetko materské mlieko dátumom a najskôr použite najstaršie materské mlieko.

**UPOZORNENIE:** Rozmrazené materské mlieko nikdy opätovne nezamrazujte.

## Rozmrazovanie

Zmrazené mlieko rozmrazte v chladničke alebo nádobu umiestnite pod tečúcu studenú vodu, pričom vodu postupne ohrievajte, kým sa mlieko neroztopí. Rozmrazené mlieko možno uchovávať v chladničke až 24 hodín. Materské mlieko nie je homogenizované a môže sa vsýchnuť, že sa oddeľuje, keď sa ušedí. Pred kŕmením dieťaťa rozmrazené mlieko jemne premiešajte, aby sa premiešali vrstvy, ktoré sa oddeľili. Materské mlieko sa môže líšiť farbou a konzistenciou v závislosti od času, kedy bolo mlieko odsaté, od toho, čo ste jedli, a od veku dieťaťa v čase odsávania.

**UPOZORNENIE: ĽUDSKÉ MLIEKO NIKDY NEZOHRIEVAJTE V MIKROVLNKE!** Mikrovlnné vlny menia zloženie mlieka. Mikrovlnná rúra môže tiež vytvoriť „horúce miesta“ v mlieku, ktoré by mohli dieťa popáliť.

**Poznámka:** NErozmrázajte materské mlieko v horúcej alebo vriacej vode.

## 5. Čistenie setu na odsávanie mlieka

**Hadičky, Y konektor ani konektor odsávačky nevyvárajte ani neumývajte!**

**Základňu odsávačky, hadičky, konektory ani nabíjateľnú batériu neoplachujte ani neponárajte do vody!**

### Čistenie súpravy na odsávanie materského mlieka po každom použití:

1. Rozoberte súpravu na odsávanie materského mlieka a odložte hadičky a konektory.
2. Ihneď po každom použití opláchnite všetky časti studenou vodou. Jednotlivé komponenty odsávačky umiestnite do čistého umývadla, ktoré sa používa len na umývanie zariadení na kŕmenie dojčiat. Komponenty odsávačky neumiestňujte priamo do výlevky, pretože časti v umývadlách alebo odtokoch by mohli kontaminovať komponenty odsávačky. Základňu odsávačky, hadičky, konektory a nabíjateľnú batériu nikdy neoplachujte ani neponárajte do vody. Utrite základňu odsávačky, klávesnicu, obrazovku a povrch, na ktorý bola odsávačka umiestnená, dezinfekčným prostriedkom s nízkou úrovňou koncentrácie, ako je etyl alebo izopropylalkohol (70 - 90 %). Podľa potreby utrite vonkajšiu časť hadičiek, pričom dbajte na to, aby sa do nich počas čistenia nedostal žiadny dezinfekčný prostriedok.
3. Ručne umyte všetky časti súpravy na odsávanie materského mlieka teplou, mydlovou vodou. Na čistenie tvrdých plastových kúsok odsávačky na odsávanie materského mlieka sa môže použiť kefka na cumle. Kefku však nepoužívajte na membránu.
4. Jednotlivé časti opláchnite tečúcou čistou vodou alebo ich ponorte do sladkej vody v samostatnom umývadle, ktoré sa používa len na čistenie predmetov na výživu dojčiat.
5. Komponenty odsávačky položte na čistú, nepoužitú utierku alebo papierovú utierku na miesto chránené pred nečistotami a prachom. Na utieranie predmetov nepoužívajte utierku. Pred montážou a použitím nechajte diely úplne vyschnúť. Čiastočne vysušené diely môžu ovplyvniť činnosť odsávačky.
6. Akonáhle sú diely suché, môžu byť uložené v čistej plastovej nádobe s vekom alebo v čistom plastovom vrecku na zips.
7. Vyčistite umývadlo a kefu na fľaše. Po každom použití ich dobre opláchnite a nechajte uschnúť na vzduchu. Umyte ich ručne alebo v umývačke riadu aspoň raz za pár dní.

### Na dennú dezinfekciu súpravy na odsávanie materského mlieka:

**Hadičky, Y konektor, konektor odsávačky, batériu ani napájací adaptér nevyvárajte ani neumývajte!**

1. Vložte čisté časti do hrnca a zakryte vodou, aby ste sa uistili, že je tam priestor na to, aby všetky časti mohli voľne plávať v hrnci.
2. Privedte vodu do varu a nechajte časti variť 5 minút.
3. Po uvarení vyberte diely z hrnca pomocou nekovových klieští a položte na čistú utierku, aby ste ich vysušili, pričom diely prikryte druhou čistou utierkou. Na utieranie predmetov nepoužívajte kuchynskú utierku, pretože by to mohlo spôsobiť prenos choroboplodných zárodkov na predmety.
4. Pred montážou a použitím nechajte diely úplne vyschnúť. Čiastočne vysušené diely môžu ovplyvniť činnosť odsávačky.

### Pred každým použitím odsávačky mlieka

1. Pred použitím odsávačky si vždy dôkladne umyte ruky mydlom a vodou a osušte ich .
2. Pred zostavením súpravy na odsávanie materského mlieka sa uistite, že sú všetky časti úplne suché.
3. Vizualne skontrolujte jednotlivé komponenty či nenájdete praskliny, úlomky, trhliny, odfarbenie alebo poškodenie. Tieto môžu ovplyvniť funkčnosť odsávačky.
4. Skontrolujte hadičky. Ak zistíte kondenzáciu v hadičke, ihneď ju umyte a osušte alebo hadičku vymeňte. Ak vo vnútri hadičiek alebo konektorov hadičiek uvidíte materské mlieko, nepokúšajte sa hadičky alebo hadičkové konektory umývať, čistíť ani dezinfikovať.
5. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa jednotlivých komponentov, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle: +42191790111 alebo navštívte stránku [www.lansinoh.sk](http://www.lansinoh.sk).

**Upozornenie:** Dôrazne sa odporúča nepoužívať iné spôsoby čistenia ako vyššie uvedené.

**Upozornenie:** Pri čistení malého bieleho ventilu buďte opatrní. Je to dôležitý komponent pre správne odsávanie. Pri čistení nepoužívajte nadmernú silu a nečistite kefkou na dočienské fľaše alebo kefkou na cumlíky. Jemne ručne umyte v horúcej mydlovej vode a opláchnite pod horúcou tečúcou vodou.

## 6. Výmena nabíjateľnej batérie

1. Odpojte napájací adaptér a uistite sa, že je odsávačka vypnutá.
2. Odstráňte kryt batérie na základni odsávačky stlačením uzamykacieho jazyčka krytu batérie smerom nadol, potiahnutím jazyčka dozadu a zdvihnutím krytu z tela odsávačky.
3. Odpojte existujúcu batériu, ktorá je spoločnosťou Lansinoh® schválená/dodaná na výmenu.
  - a. Držte káble pripojené k odsávačke a batérii a opatrne vyberte batériu zo základne odsávačky, čím odkryjete konektor batérie.
  - b. Stlačte uzamykaciu plôšku konektora batérie smerom nadol a jemne potiahnite káble.
  - c. Úplne vyberte a správne zlikvidujte starú batériu.
4. Nainštalujte nabíjateľnú batériu Lansinoh®
  - a. Zarovnajzte jazyček konektora batérie so štrbinou konektora odsávačky.
  - b. Zatlačte konektor úplne na miesto.
  - c. Jemným potiahnutím za káble skontrolujte, či je konektor batérie úplne nainštalovaný.
5. Vložte batériu do priehradky na batérie. Batériu je možné umiestniť do jednej z dvoch polôh s vodičmi buď hore alebo dole.
  - a. Uistite sa, že vodiče batérie sú umiestnené v hornej alebo dolnej časti priehradky na batérie a uistite sa, že káble nezasaňujú do tela pumpy.
  - b. Jemným zatlačením vodičov do priehradky na batérie sa uistite, že káble batérie nebudú zasahovať do krytu batérie.
6. Znovu nainštalujte kryt batérie
  - a. Zasuňte dve spodné úchytky krytu batérie do štrbin krytu.
  - b. Sklopte kryt batérie na miesto.
  - c. Dokončíte inštaláciu krytu batérie stlačením uzamykacej západky krytu batérie, kým sa povrch krytu nezohodne s povrchom tela pumpy. Keď je správne nainštalovaný, úchytky krytu batérie zapadne na svoje miesto. Budete počuť cvaknutie.
7. Po výmene batérie zlikvidujte použitú batériu v súlade s miestnymi predpismi.

## 7. Riešenie problémov

### Odsávačka nemá žiadny výkon

- Napájací adaptér nie je správne pripojený. Skontrolujte, či je napájací kábel stále zapojený do odsávačky a do zástrčky.
- Batéria nie je správne pripojená. Skontrolujte, či je konektor batérie úplne zasunutý.
- Batéria je vybitá. Zapojte odsávačku do externého zdroja napájania a nabíjajte odsávačku 3 hodiny.
- Ak sa odsávačka stále nezapína, kontaktujte zákaznícky servis Lansinoh® na telefónnom čísle +421917900999 alebo e-mailom na [info@lansinoh.sk](mailto:info@lansinoh.sk).

### Prerušenie elektriny

- Ak dôjde k prerušeniu bežnej prevádzky elektrickej a/alebo mechanickej funkcie odsávačky, jednoducho vykonajte nasledovné:
- Skontrolujte, či je napájací kábel stále zapojený do odsávačky a zástrčky.
  - Ak používate nabíjateľnú batériu, skontrolujte, či je konektor batérie úplne zasunutý a či je batéria správne nabitá.
  - Ak dôjde k odpojeniu napájacieho kábla alebo batérie, opravte pripojenie a potom stlačením a podržaním tlačidla pre zapnutie odsávačky zapnite.
  - Ak sa odsávačka vypína a napájací adaptér a batéria sú správne pripojené, kontaktujte zákaznícky servis Lansinoh® na telefónnom čísle +421917900999 alebo e-mailom na [info@lansinoh.sk](mailto:info@lansinoh.sk).

## 8. Technické údaje

### 1. Napájanie














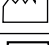


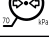
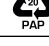





**Prevádzka na batérie:** Dobijacia lítiovo-iónová batéria  
**Prevádzková doba:** Výdrž batérie je približne 3 hodiny, keď odsávačka beží na maximálne nastavenia. Výsledky závisia od čerstvosti batérie a nastavení odsávačky.  
**Prevádzka AC adaptéra:** 100-240VAC typ zástrčky AC adaptéru, galvanicky oddelený s výstupným napätím 9VDC  
**Stratový výkon odsávačky:** maximálne 15 wattov.  
**Regulácia napätia:** Lineárny regulátor napätia s nízkym výpadkom napätia a ochranou proti skratu.

### 2. Kontrolný systém


**Kontrolná jednotka:** Mikrokontrolér s internou programovou pamäťou  
**Pamäť programu:** 32K flash ROM, 2K pamäť RAM  
**HMI:** LCD displej s LED podsvietením, softvérová klávesnica  
**Jednoduché/dvojité ovládanie:** voľiteľné jednoduché alebo dvojité odsávanie mlieka  
**Voľiteľný režim odsávania:** voľiteľné 3 režimy štýlu odsávania a ovládané z klávesnice  
**Nastaviteľná úroveň nasávania:** voľiteľných 8 úrovní nasávania, ktoré sa dajú zvoliť pomocou klávesnice odsávačky  
**Úroveň sacieho vákuu (fáza stimulácie/odsávania):** minimálne 100 mmHg, maximálne 280 mmHg

### 3. Požiadavky na napájanie

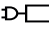**AC adaptér (súčasť balenia):** Multiregionálny AC adaptér - zástrčka pre EÚ a Spojené kráľovstvo  
**Konfigurácia 100-240VAC:** zásuvka typu AC adaptér, galvanicky oddelený adaptér s výstupným napätím 9VDC.  
**Predpokladaná životnosť odsávačky je 500 hodín.**  
V prípade produktov so vstupným uzemňovacím koílkom umiestnite do blízkosti oblasti prístupnej k správne uzemnenej zásuvke.

SYMBOL	VYSVETLIVKY	SYMBOL	VYSVETLIVKY
	Postupujte podľa návodu na použitie		Uchovávajte mimo dosahu detí
	Identifikuje výrobcu		Vložte batériu so správnym smerom
	Označuje dátum výroby		Kovové časti držte ďalej od koncov batérie
	Použitý diel typu BF		Nepoužívajte kovové nástroje na dotýkanie sa alebo otváranie batérie
	Zariadenie triedy II		Batéria je recyklovateľná
	Udržujte prístroj v suchu		Batériu neháďte do ohňa
	Chrňte zariadenie pred slnečným žiarením		Označuje opatrné zaobchádzanie s krehkým zariadením
	Označuje teplotné obmedzenie pre prevádzku, prepravu a skladovanie		Označuje obmedzenie vlhkosti pre prevádzku, prepravu a skladovanie
	Označuje obmedzenie atmosférického tlaku pre prevádzku, prepravu a skladovanie		Číslo 20 vo vnútri univerzálneho symbolu recykliácie predstavuje predmety vyrobené z kartónu. Kartón je recyklovateľný, ale nie všetky krajiny ho akceptujú
	Zaručuje, že obaly s týmto symbolom sú recyklovateľné a budú akceptované recyklovaťmi		Tento symbol označuje, že napájací adaptér je určený len na vnútorné použitie
<b>IP22</b>	Označuje ochranu pred vniknutím pevných cudzích predmetov a pred škodlivými účinkami v dôsledku vniknutia vody		Označuje, že na pripojenie zariadenia k napájacej sieti je potrebné osobitný samostatný napájací adaptér, a špecifikuje jeho model/typ.
	Označuje, že balenie obsahuje výrobky určené na styk s potravinami	<b>CE</b>	Označenie CE znamená, že výrobok bol posúdený výrobcom a považuje sa za výrobok, ktorý spĺňa požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia
	Táto odsávačka je vyrobená z rôznych kovov a plastov. Pred likvidáciou je potrebné zariadenie znefunkčniť a zlikvidovať ho ako triedený odpad v súlade s miestnymi predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Aby ste predišli škodlivým účinkom na životné prostredie a verejné zdravie, dodržujte určené miestne pravidlá zbera a zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (vrátane batérii).		

### Pri údržbe napájacieho adaptéra postupujte podľa týchto pokynov:

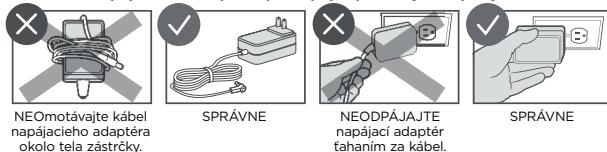

**NEPOUŽÍVAJTE adaptér ak je poškodený.**

**Upozornenie:** Deti sa môžu káblami uskŕtiť. Káble uchovávajte mimo dosahu detí.

### Lítiová batéria

V prípade nesprávneho používania batérie môže vzniknúť riziko požiaru alebo poľptania chemikáliami. Batériu nerozoberajte, nezohrievajte, nepáľte ani neháďte do ohňa. Batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

NABÍJATEĽNÁ BATÉRIA: 7.4V, 1500MAH, LÍTIOVO-IÓNOVÁ	
Indikátor batérie sa zobrazuje so 4 čiarokami	Zostávajúci prevádzkový čas: Približne 3 hodiny
Indikátor batérie zobrazený s 1 prúžkom	Zostávajúci prevádzkový čas: Približne 1 hodina
Indikátor batérie bliká	Zostávajúci prevádzkový čas: Približne 0,5 hodiny

## 9. Záruka

Naša záruka sa vzťahuje na všetky chyby, ktoré ovplyvňujú výkon odsávacieho mechanizmu na 2 roky a ostatné súčasti produktu našej odsávačky mlieka na 90 dní. Táto záruka sa nevzťahuje na kozmetické, náhodné poškodenie, nesprávne použitie, nesprávne použitie napätia, každodenné opotrebovanie, poruchy alebo poškodenia, ktoré sú výsledkom nesprávneho používania odsávačky a na odsávačky, ktoré boli upravené alebo používané viacerými osobami. Zo zdravotných a hygienických dôvodov by sa naše odsávačky nemali ďalej predávať a naša záruka sa nevzťahuje na žiadnych ďalších majiteľov. V prípade poruchy odsávačky materského mlieka, na ktorú sa vzťahuje naša záruka, odsávačka mlieka alebo dotknuté časti opravíme alebo vymeníme. To môže znamenať, že vám poskytneme jeden alebo viac náhradných dielov. Môžeme vás požiadať, aby ste odsávačku a/alebo chybné komponenty vrátili na testovanie alebo opravu. Ak chcete uplatniť nárok v rámci tejto záruky, mali by ste nám oznámiť chybu tak, že nás budete kontaktovať na našom webe [www.lansinoh.sk](http://www.lansinoh.sk). Spolu s odsávačkou je potrebné poskytnúť aj doklad o kúpe odsávačky mlieka alebo jej časti. Následne vás budeme informovať o ďalšom postupe. PRAVE ZÁKONNÉ PRÁVA NIE SÚ DOTKNUTÉ.

Veď viac informácií o vašich právach nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho webu. Tuto záruku poskytujú Lansinoh Laboratories Inc, Ground Floor, West Mayesbrook House, Lawnswood Business Park, Leeds, LS16 6QY. Tento produkt je produktom osobnej starostlivosti, a preto ho po otvorení nemožno vrátiť. Ak sa vyskytnú nejaké problémy s týmto produktom, zavolajte na našu zákaznícku linku na čísle +421917 90111.